

ITEM 4970

Instrucciones de uso:

Doblar la pieza metálica hasta que el líquido comience a calentarse y cristalizarse.

Mezclar suavemente y colocar en la zona deseada.

Reutilización:

Sumergir la bolsa completamente en agua hirviendo, hasta que vuelva a estado líquido. (Esto tardará unos 5 minutos aproximadamente)

Precaución:

Dejar enfriar completamente o meter en agua fría durante cinco minutos antes de reutilizar
No perforar la bolsa.

No utilizar calentadores eléctricos ni microondas para calentar la bolsa.

ITEM 4970

How to use:

Bend the inside metal chip until the liquid starts to crystallize and heat up.

Press gently to even at the crystals and place in the desired area.

How to reuse:

Fully immerse the bag into boiling water until it returns to liquid state

(This will take about 5 minutes)

Caution:

Cool completely or put into cold water for 5 minutes before reusing

Do not pierce the bag

Do not use in electric kettle or microwave.

Instrucciones de uso:

Doblar la pieza metálica hasta que el líquido comience a calentarse y cristalizarse.

Mezclar suavemente y colocar en la zona deseada.

Reutilización:

Sumergir la bolsa completamente en agua hirviendo, hasta que vuelva a estado líquido.
(Esto tardará unos 5 minutos aproximadamente)

Precaución:

Dejar enfriar completamente o meter en agua fría durante cinco minutos antes de reutilizar
No perforar la bolsa.
No utilizar calentadores eléctricos ni microondas para calentar la bolsa.

How to use:

Bend the inside metal chip until the liquid starts to crystallize and heat up.

Press gently to even at the crystals and place in the desired area.

How to reuse:

Fully immerse the bag into boiling water until it returns to liquid state
(This will take about 5 minutes)

Caution:

Cool completely or put into cold water for 5 minutes before reusing
Do not pierce the bag
Do not use in electric kettle or microwave.